

<b>POINT OF CONTACT</b> ALSICO N.V. Zonnestraat 223 9600 Ronse - Belgium T + 32 55 23 71 71 F + 32 55 23 71 79	<b>GBRUIKINSTRUCTIES</b> <h1>HERBRUIKBAAR ALSICO MASK</h1> <h2>Type C</h2>		NEDERLANDS Version 01 Date 15.05.2020 pagina 1 of 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

### TOEPASSING

Dit ALSICO masker is een herbruikbaar masker. Alsico maskers kunnen mee helpen voorkomen dat ziektekiemen zich verspreiden. Door het masker te dragen kan je vermijden dat anderen besmet raken. Het vermijdt dat je met je handen je mond en neus aanraakt en het is zo ontworpen dat het speekseldruppels tegenhoudt, die vrijkomen bij het praten, hoesten of niezen. Een masker werkt echter alleen als je het correct draagt en verwijderd. Dit masker is geen medisch hulpmiddel, noch een persoonlijk beschermingsmiddel. Het gebruik van het masker betekent niet dat je je niet hoeft te houden aan alle opgelegde richtlijnen zoals afstand houden ('social distancing') en de hygiënevoorschriften (grondig en geregeld handen wassen, ademhalingshygiëne), ...

### GBRUIKINSTRUCTIES

Het masker moet gewassen worden alvorens het een eerste keer te gebruiken: zie **ONDERHOUD**

Gebruik het masker in situaties waar het dragen van een masker van dit type wordt aanbevolen, zoals bij het winkelen, bij gebruik van het openbaar vervoer en in werkomgevingen die geen maskers vereisen die moeten voldoen aan de medische hulpmiddelen of persoonlijke beschermingsmiddelen. Het masker moet correct bevestigd worden:

#### Het Masker dragen



**Stap 1**  
Was je handen met water en zeep voordat je het masker aanraakt



**Stap 2**  
Controleer het masker om er zeker van te zijn dat er geen gaten of scheuren in zitten



**Stap 3**  
Houd het masker vast met de buigbare strip naar boven en de gekleurde kant naar buiten gericht (of waar het logo zich bevindt)



**Stap 4**  
Zet het masker op volgens het type masker dat u gebruikt



**Gezichtsmasker met stopper**  
Breng de lus zonder stopper over uw hoofd, positioneer het masker en vervolgens de lus met stopper over uw hoofd en pas ze aan met de stopper zodat het masker neus, mond en kin bedekt



**Gezichtsmasker met oorlussen**  
Houd beide oorlussen vast, rek ze voorzichtig uit en haak ze achter de oren, zodat het masker neus, mond en kin bedekt



**Gezichtsmasker met striklinten**  
Knoop eerst de bovenste strik gevolgd door de onderste strik, zodat het masker neus, mond en kin bedekt



**Gezichtsmasker met elastische banden**  
Trek de onderste band over uw hoofd en vervolgens de bovenste band, pas het masker aan zodat het neus, mond en kin bedekt



**Stap 5**  
Vorm of knijp in de neusstrip om zich aan te passen aan de vorm van uw neus

Het masker moet steeds correct over de mond, neus en kin gedragen worden en voldoende aansluiten. Dit kan u gemakkelijk aanpassen met het schuifstelsel en de stopper. Het dragen van een masker vraagt aanpassing. De drager kan het gevoel hebben van minder ademlucht te hebben, Dit is normaal en een teken dat het masker werkt.

De buitenzijde is de zijde waar zich het logo bevindt. Telkens je het masker aanraakt, moet je de handen wassen en/of desinfecteren. Verwissel het masker op een correcte manier door een nieuw of gewassen exemplaar als het te vochtig aanvoelt of als het langer dan vier uur aan één stuk gedragen is. Zie verderop voor het correct verwijderen van het masker. Gebruik het masker niet opnieuw als het niet correct gewassen en gedroogd is. Draag het masker nooit onder de kin om nadien terug goed te plaatsen. In zo'n geval moet je het masker correct verwijderen en vervangen door een nieuw exemplaar.

#### Het masker verwijderen



**Stap 1**  
Was je handen met water en zeep voordat je het masker aanraakt



**Stap 2**  
Raak de voorkant van het masker niet aan, omdat het mogelijk besmet is. Raak alleen de oorlussen, striklinten of banden aan



**Stap 3**  
Verwijder het masker volgens het type masker dat u gebruikt. Zonder de voorkant van het masker aan te raken.



**Gezichtsmasker met stopper**  
Los de stopper en trek eerst de onderste lus over uw hoofd en vervolgens de bovenste, zonder de voorkant van het masker te raken



**Gezichtsmasker met oorlussen**  
Houd beide oorlussen vast, maak ze los en til ze voorzichtig op om het masker te verwijderen



**Gezichtsmasker met striklinten**  
Maak eerst de onderste strik los, gevolgd door de bovenste strik, trek het masker weg zonder de voorkant van het masker aan te raken



**Gezichtsmasker met elastische banden**  
Til de onderste band over uw hoofd en trek vervolgens de bovenste band over uw hoofd, zonder de voorkant van het masker aan te raken.



**Stap 4**  
Gooi het masker in een gesloten wasmand



**Stap 5**  
Was je handen met water en zeep voordat je iets anders aanraakt

### BEPERKINGEN

Het gebruik van dit masker is geen reden om alle geldende regels met betrekking tot sociale afstand, handhygiëne en ademhalingshygiëne niet toe te passen of in een versoepeld regime.

Dit masker is geen medisch hulpmiddel in de zin van Richtlijn 93/42/EEC of Verordening (EU)2017/745 medische hulpmiddelen. Dit masker mag dan ook niet ingezet worden in die toepassingen waar moet voldaan worden aan deze Richtlijn of Verordening.

Dit masker is geen persoonlijk beschermingsmiddel in de zin van Verordening (EU) 2016/425 persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit masker mag dan ook niet ingezet worden in die toepassingen waar moet voldaan worden aan deze Richtlijn of Verordening.

Dit masker is niet ontworpen om uw longen te beschermen tegen risico's in de lucht.

Dit product is niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar wegens verstikkingsgevaar. Kinderen die het masker gebruiken moeten gesuperviseerd worden door een volwassene.

Het mondmasker laat geen zware inspanning toe, vb intensief sporten. Niet gebruiken wanneer ademen te moeilijk wordt of misselijkheid of een ander ongemak optreedt. Bij volwassenen met aandoeningen aan de luchtwegen is doktersadvies aanbevolen

Niet in de buurt van vuur of hittebron brengen.

### ONSCHADELJKHEID

Deze maskers bevatten geen substanties die vandaag bekend zijn als kankerverwekkend; mutageen of toxisch voor de voortplanting.

### TEKENEN VAN SLIJTAGE EN ONDERHOUD

De maskers moeten voor (her)gebruik gecontroleerd worden op beschadigingen en verouderingsverschijnselen. Indien nodig moet het masker vervangen worden. Het masker mag niet hersteld worden.

Er is geen directe relatie tussen het maximum aantal wasbeurten die kunnen worden gespecificeerd en de levensduur van het masker. De levensduur hangt af van hoe de producten worden gebruikt, onderhouden, opgeslagen enz.

### ONDERHOUD

Dit masker is herbruikbaar als het op een correct manier gewassen en gedroogd wordt. Dit kan minimaal 25x gewassen worden, maximaal 100x

Was steeds grondig de handen na het openen en sluiten van de container. De container moet worden gedesinfecteerd na het leegmaken.

De stopper verwijderen voor het wassen en de maskers afzonderlijk wassen.

### Huishoudelijk wassen

Om voldoende ballast te hebben kan je een badhanddoek mee wassen bij de maskers. Gebruik steeds dezelfde badhanddoek en enkel voor deze toepassing. Eventueel kan je de maskers ook in een netje wassen.



Wassen voor gebruik en voor ieder hergebruik

Kookwas met gewoon wasmiddel (min. 30 minuten) geen wasverzachter gebruiken

Niet bleken

Drogen in de droogkast op normale cyclus

Niet strijken - Niet droogreinigen

### MAATAANDUIDING

Eén maat

### SAMENSTELLING

Type C : 100%PE

### TYPE

Multiface, 1-lagig, conform NBN/DTD S65-001:2020 "Community Masker"

### Industriële wassen

Voor industriële wasprocessen kan een lagere temperatuur gebruikt worden (min. 60°C) in combinatie met de correcte industriële wasmiddelen/-processen voor medische toepassingen. Drogen in de droogtrommel aan max. 85°C

### OPSLAG – RECYCLING

Bewaren op een droge en van vuil, licht en contaminatie afgeschermd plaats zolang de maskers niet worden gebruikt..

Gebruikte maskers moeten, gedurende zo kort mogelijke tijd, in een aparte afgesloten container worden bewaard alvorens te wassen. Steeds de handen goed wassen na openen en sluiten van de container. Deze containers ook telkens desinfecteren na het leegmaken.

Na de laatste draagbeurt het masker nogmaals wassen en drogen volgens de instructies zodat het kan ingeleverd worden voor recycling, of meegegeven met de gewone afval. Niet gewassen kan het enkel in een vuilnisbak voor medisch afval.

### WAARSCHUWING

Er bestaat steeds een zeer klein risico dat ook indien alle voorzorgsmaatregelen en richtlijnen gevolgd worden inzake social distancing, handhygiëne, correct gebruik van het masker etc, er toch een lichte contaminatie op het masker plaatsvindt van geïnfecteerde druppels, zowel op de binnen als buitenzijde.

### DISCLAIMER

Alsico NV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gevolgen van het niet correct gebruiken van het masker, alsook voor het inzetten van het maskers in situaties waar producten dienen ingezet te worden die voldoen aan de medische richtlijn en/of verordening voor persoonlijke bescherming.

Gebruik van het masker, anders dan beschreven in deze gebruiksinstructies is volledig op eigen risico.

Alsico NV kan niet verantwoordelijk gesteld worden als de slijtage sneller zou optreden dan het maximum aantal wasbeurten. Men moet het masker steeds controleren op beschadiging alvorens het opnieuw in te zetten.

Productgarantie is uitgesloten.

www.alsicomasks.com

masks@alsicomasks.com